

INSTRUKCJA POBIERANIA KRWI DO BADANIA METODĄ ELISPOT

Materiał może być pobrany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

Skład zestawu wysyłkowego:

- Probówka CPDA 4,9 ml – 3 szt.
- Holder – 1 szt.
- Igła - 1 szt.
- Gazik odkażający – 1 szt.
- Ochronne pudełko styropianowe – 1 szt.
- Rękawiczki lateksowe – 1 szt.
- Pudełko kartonowe – 1 szt.
- Torebka strunowa – 1 szt.
- Koperta zwrotna – 1 szt.
- Instrukcja pobierania krwi – 1 szt.
- Formularz zlecenia badań – 1 szt.

I. Czynności przed pobraniem materiału:

- Nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie pacjenta.

UWAGA! System zamknięty pozwala na uniknięcie manipulacji pobieranym materiałem, które mogą wiązać się z uzyskaniem wyników fałszywych poprzez kontaminację próbki. Nie należy otwierać próbek ani przelewać pobranego materiału.

UWAGA! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem krwi należy koniecznie wykonywać w ochronnych rękawiczkach lateksowych.

1. Krew pobrać na wszystkie probówki (CPDA) dołączone do zestawu.
2. Po pobraniu, każdą probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.
3. Probówki krwi należy umieścić w pudełku ochronnym, a następnie w dołączonej torebce strunowej.
4. Wypełnić „**Formularz zlecenia badań**”:

a. podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia,

b. wybrać zlecane badania zaznaczając czytelnie odpowiednie pola

c. uwaga: podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań.

5. Pudełko styropianowe umieścić w dołączonej torebce strunowej, a następnie wraz z formularzem zlecenia w kartonowym pudełku i w zaadresowanej kopercie zwrotnej.
6. Pobrany materiał przechowywać w temperaturze pokojowej.

UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu 24 godzin od pobrania.

W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta mBank:

33 1140 2004 0000 3402 7868 6296

Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do wtorku.