

INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW Z POLICZKA

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

Skład zestawu wysyłkowego:

- Sterylna pałeczka w probówce do wymazów – 2 - 4 szt.
- Koperta do zabezpieczania wymazów – 2- 4 szt.
- Koperta bezpieczna „AMERSAFE” – 1 szt.
- Wkład wysuszający – 1 szt.
- Rękawiczki lateksowe - 2 szt.
- Formularz zlecenia badań – 1 szt.
- Instrukcja pobierania materiału – 1 szt.
- Koperta zwrotna – 1 szt.


I. Czynności przed pobraniem materiału:

- Co najmniej na **1 godzinę** przed pobraniem wymazu nie należy spożywać posiłków, płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani myć zębów.
- Przed pobraniem w jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych, np. gum do żucia, lizaków, cukierków itp. W przypadku dzieci dopuszczalny jest smoczek (tzw. smoczek z kółeczkiem) pod warunkiem używania go wyłącznie przez jedno dziecko (nie np. przez matkę i dziecko lub więcej niż jedno dziecko).

II. Czynności w trakcie pobierania wymazu:

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem krwi należy koniecznie wykonywać w ochronnych rękawiczkach lateksowych.


1. Opisać właściwą liczbę wymazówek i kopert do zabezpieczenia wymazów informacją o domniemanym pokrewieństwie (np.: domniemany ojciec, dziecko1, dziecko2, matka).

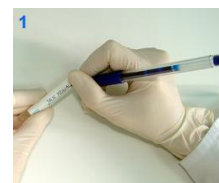

2. Otworzyć opakowanie i wyjąć wymazówkę z probówki ochronnej.



UWAGA! Koniec wymazówki nie może dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby poza osobą, od której pobierany jest wymaz.

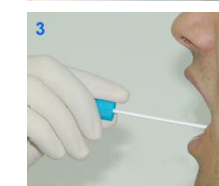

3. Wymaz pobrać poprzez płynne pocieranie końcem wymazówki wewnętrznej strony obu policzków. Dokonać pobrania wymazu kolejno od wszystkich osób uczestniczących w badaniu.

4. Po pobraniu wymazu należy niezwłocznie umieścić wymazówkę w opisanej probówce ochronnej.
5. Zabezpieczoną wymazówkę należy następnie umieścić w opisanej kopercie i zakleić kopertę.



UWAGA! Każdą wymazówkę umieścić w oddzielnej kopercie.

6. Wszystkie koperty z pobranymi wymazami umieścić w kopercie bezpiecznej „AMERSAFE”
7. Do czasu transportu wymazówki przechowywać lodówce w temp. 2-8°C.



NIE ZAMRAŻAĆ!

UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu 5 dni. Podczas transportu, pobrany wymaz nie wymaga chłodzenia.



8. Opisać Kopertę Bezpieczną czytelnie wypełniając poszczególne pola (nadawca, odbiorca, data nadania i podpis nadawcy), a następnie oderwać jeden odcinek kontrolny koperty i zachować go.



9. Wypełnić „Formularz zlecenia badań”:

- podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia;
- wybrać zlecane badania genetyczne zaznaczając czytelnie odpowiednie pola;
- **uwaga! podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań.**

10. Opisaną Kopertę Bezpieczną, zawierającą odpowiednio zabezpieczone i opisane wymazówki oraz wypełniony i podpisany przez zleceniodawcę „Formularz zlecenia badań genetycznych” (opatrzone podpisem osoby zlecającej badanie) należy umieścić w zaadresowanej zwrótnie kopercie zbiorczej.

**W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta mBank:
33 1140 2004 0000 3402 7868 6296**

Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do czwartku.