

## INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW Z POLICZKA

**UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.**

### Skład zestawu wysyłkowego:

- Sterylna pałeczka w probówce do wymazów – 2- 4 szt.
- Koperta do zabezpieczania wymazów – 2- 4 szt.
- Rękawiczki lateksowe - 2 szt.
- Formularz zlecenia badań – 1 szt.
- Instrukcja pobierania materiału – 1 szt.
- Koperta zwrotna – 1 szt.


### I. Czynności przed pobraniem materiału:

- Co najmniej na **1 godzinę** przed pobraniem wymazu nie należy spożywać posiłków, płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani myć zębów.
- Przed pobraniem w jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych, np. gum do żucia, lizaków, cukierków itp. W przypadku dzieci dopuszczalny jest smoczek (tzw. smoczek z kółeczkiem) pod warunkiem używania go wyłącznie przez jedno dziecko (nie np. przez matkę i dziecko lub więcej niż jedno dziecko).

### II. Czynności w trakcie pobierania wymazu:

**Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem krwi należy koniecznie wykonywać w ochronnych rękawiczkach lateksowych.**

1. Opisać wymazówki i koperty do zabezpieczenia wymazu imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania wymazu.
2. Otworzyć opakowanie i wyjąć wymazówkę z probówki ochronnej.

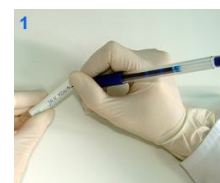

**Uwaga! Koniec wymazówki nie może dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby poza osobą, od której pobierany jest wymaz.**

3. Wymaz pobrać poprzez płynne pocieranie końcem wymazówki wewnętrznej strony obu policzków.



**Uwaga! U dzieci nabłonek jamy ustnej złuszcza się w dużo większym stopniu (dostosowanie siły i czasu pocierania).**

4. Po pobraniu wymazu należy niezwłocznie umieścić wymazówkę w opisanej probówce ochronnej.
5. Zabezpieczoną wymazówkę należy następnie umieścić w opisanej kopercie i zakleić kopertę.



6. Powyższą procedurę powtórzyć z kolejną wymazówką. Każdą wymazówkę umieścić w oddzielnej kopercie.

7. Do czasu transportu wymazówki przechowywać lodowce w temp. 2-8°C.

**NIE ZAMRAŻAĆ!**



**UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu 5 dni. Podczas transportu, pobrany wymaz nie wymaga chłodzenia.**

8. Wypełnić „Formularz zlecenia badań”:

- a. podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia;
  - b. wybrać zlecane badania genetyczne zaznaczając czytelnie odpowiednie pola;
  - c. **uwaga! podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań.**
9. Próbkę do badań umieścić w kopercie z wkładem pęcherzykowym wraz z wypełnionym formularzem zlecenia (opatrzonym podpisem osoby poddanej badaniu).

**W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta mBank:  
33 1140 2004 0000 3402 7868 6296**

**Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do czwartku.**