

INSTRUKCJA POBIERANIA KRWI PEŁNEJ

Materiał może być pobrany **wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.**

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

Skład zestawu wysyłkowego:

- Probówka EDTA 3.0 ml – 1 szt.
- Igła – 1 szt.
- Holder – 1 szt.
- Gazik odkażający – 1 szt.
- Rękawiczki lateksowe – 2 szt.
- Ochronne pudełko styropianowe – 1 szt.
- Wkład chłodzący – 3 szt.
- Pudełko zwrotne – 1 szt.
- Instrukcja pobierania krwi – 1 szt.
- Formularz zlecenia badań – 1 szt.

I. Czynności przed pobraniem materiału:

- Dołączone do zestawu wkłady chłodzące należy umieścić w zamrażarce, na **co najmniej 6 godzin** przed pobraniem materiału w celu całkowitego ich zamrożenia - umożliwi to utrzymanie właściwej temperatury próbki krwi w czasie transportu.
- Nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie pacjenta.

UWAGA! Krew może być wykorzystana do badań genetycznych pod warunkiem, że w czasie minimum 3 miesięcy poprzedzających badanie nie było przetoczenia krwi (transfuzji).

UWAGA! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem krwi należy koniecznie wykonywać w ochronnych rękawiczkach lateksowych.

1. Krew pobrać na probówkę (EDTA) dołączoną do zestawu.
2. Po pobraniu, **probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.** Próbkę krwi należy transportować zawsze w pudełku ochronnym, zawierającym zmrożone wkłady chłodzące, lub w innym pojemniku gwarantującym utrzymanie temperatury wewnętrznej 2-8°C.
 - Wypełnić „**Formularz zlecenia badań**”:
 - podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia,
 - wybrać zlecane badania zaznaczając czytelnie odpowiednie pola
 - **uwaga: podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań.**
3. Pudełko styropianowe umieścić w pudełku wraz z formularzem zlecenia.

UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu 4 dni w temperaturze 2-8 °C.

UWAGA! Krwi nie wolno zamrażać. Zamrożenie uniemożliwia uzyskanie prawidłowych wyników badań. Z tego samego powodu pobrana krew nie może zawierać skrzepów.

**W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta:
mBank: 33 1140 2004 0000 3402 7868 6296**

Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do czwartku.